

KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJE

Oiva-osastovaunu

Mallit 70000_1 - 70000_13

(Malli variaatiot tarjottimien määrästä ja syvyydestä riippuen)

Turvamääräykset

- Älä istu, seiso tai nojaa vaunun päälle.
- 100 mm korkean tarjottimen painoraja 6kg.
- 60 mm korkean tarjottimen painoraja 4kg.
- 45 mm korkean tarjottimen painoraja 3kg.
- 70003 lisätason painoraja 3kg.
- Telineihin ei saa kohdistua muuta painoa kuin telineelle suunnatun astian/pullon paino.
- Otathan huomioon ylimmän tarjottimen painorajan telineitä asetettaessa tarjottimen ympäri kiertävälle kiskolle.
- Mikäli olet tilanne 3-POD näytteenottotuolin, sen saa asettaa sille tarkoitettuun paikkaan, työntökahvojen alla olevaan hahloon.
- Näytteenottotuoli tulee irrottaa telineestä ennen istumista.




Pesu- ja huolto-ohje

- Rungon, tarjottimien ja telineiden pesuun suositellaan käytettäväksi pH:ltaan neutraaleja tai lievästi emäksisiä (7-10 pH) pesuaineita.
- Huomioithan, että emäksiset pesuaineet (pH 12-14) voivat heikentää maalattujen pintojen kiiltoa ja syövyttää kromattuja pintoja.
- Myös pH 11 pesuaine voi vahingoittaa maalattuja pintoja, erityisesti jos sitä käytetään toistuvasti tai jätetään vaikuttamaan pitkäksi aikaa. Se voi heikentää maalipinnan kiiltoa ja aiheuttaa haalistumista.
- Kromattujen pintojen kohdalla pitkäaikainen tai toistuva käyttö voi aiheuttaa syöpymistä ja pinnan mattapintaisuutta.
- Suositeltavaa on huuhdella pinnat huolellisesti vedellä pesun jälkeen ja välttää pitkää altistusta vahvasti emäksisille aineille.
- Kulmasuojien pesulämpötila korkeintaan 60 astetta.
- Vaunun rungon ilman pyöriä, tarjottimien ja telineiden pesulämpötila on korkeintaan 94 astetta.
- Tarjottimien mustat säätöruuvit eivät kestä konepesua, käsinpesu.
- Telineiden pesuun suosittelemme käsinpesua. Konepesussa telineiden reunasuojanauha voi irrota. Vaihtoehtoisesti ota reunasuojanauha pois konepesun ajaksi.
- Oiva-vaunussa käytetään Mannerin Tango pyöriä. Pyöriä ei saa purkaa.
 - Veden lämpötila: Riippuen poistettavasta liasta 20 - 80 astetta (kun kyseessä on vesi).
 - Kumi alle +70 astetta.
 - Käytettävä paine max. 4bars, mahdollinen paine suositellaan olevan suunnattu alaspäin.
 - Painetta ei saa suunnata haarukoiden kuulalaakeria vastaan alkaen alapuolelta, eikä pyöriä saa pestä ylösalaisin käännettyinä. Kosteus voi tunkeutua kuulalaakereihin ja siten edesauttaa niiden korroosiota.

Tarjotin:

- Tarjotin asetetaan vaunun runkoon kallistamalla tarjotinta, kuten kuvassa.
- Tämän jälkeen tarjotin lasketaan tikkaan varaan niin, että mustat pehmustetyynyvät ovat keskellä putkea.
- HUOM! Mustat pehmusteruuvit tulee säätää niin, että tarjotin on noin 2cm yläviistossa. Painoa laitettaessa tarjottimen päälle, tarjotin laskeutuu vaakasuoraan.
- Vaunun rungossa on kuusi tikasta, joihin tarjotin voidaan asettaa.
- Tarjotin on valmistettu alumiinista ja maalattu valkoisella jauhemaalilla.
- Tarjottimia voi tilata myös erikseen.

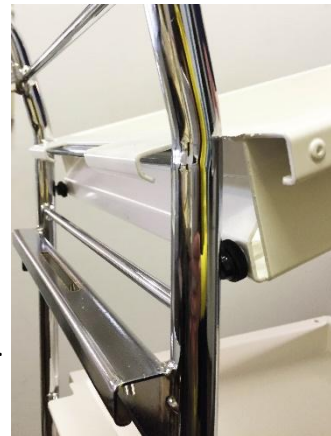

70003 Lisätaso:

- Lisätaso toimii työtasona tai alustana mobiilitulostimelle ja putkisekoittajalle.
- Taso pujotetaan ylimmän tikkaan päälle.
- Painetaan kevyesti, jotta taso pysyy paikoillaan eikä kolise.
- Tason sivulla oleva pieni lokero sopii kännykän säilytykseen.
- Taso on valmistettu alumiinista ja maalattu valkoisella jauhemaalilla.



Lisävarustetelineet:

- Telineet asetetaan tarjottimen sivuille, eteen tai työntökahvan alla olevalle innogrip-kiskolle.
- Innogrip-kisko on 60 mm ja 100 mm syvissä tarjottimissa.
- 45 mm syvässä tarjottimessa ei ole innogrip-kiskoa turvallisuussyistä.
- Teline asetetaan vaakasuorassa asennossa tarjottimen reunaa pitkin ylös ja vedetään hieman itseän päin.
- Tämän jälkeen teline voidaan laskea roikkumaan kiskolle.



Ongelmatilanteissa ota yhteys:

Numeroon 045 342 4641 tai sähköpostitse info@innopart.fi